




Jak to działa:

1. Podłącz wzmacniacz do źródła zasilania, przy użyciu złącza oznaczonego "RadioLink only". Kiedy wzmacniacz zostanie podłączony, zaświeci się zielone światelko.

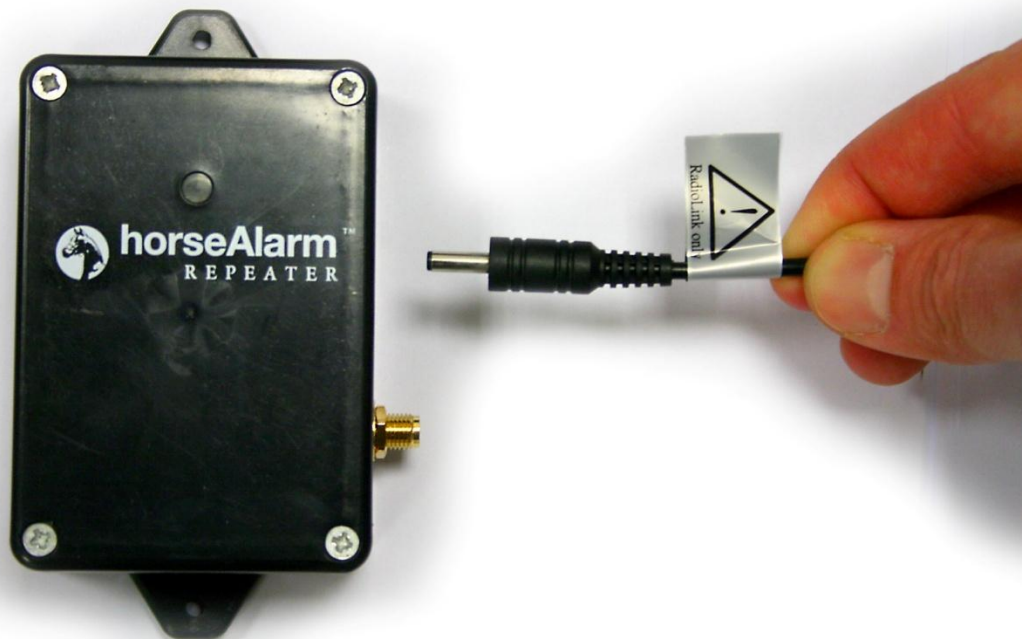

2. Podłącz odbiornik do źródła zasilania, używając złącza oznaczonego "horseAlarm receiver only":



3. Włącz odbiornik, naciskając przycisk ON na wierzchu urządzenia:



4. Upewnij się, że używasz ustawienia odbiornika "Simple Mode", naciskając przycisk "D" tak długo, aż ukaze się poniższy obrazek przedstawiający konia.



Po około 40 s wskaźnik "LINK" zmieni kolor na czerwony, a odbiornik wyda dźwięk informujący Cię o tym, że odbiornik nie otrzymuje danych z nadajnika.



5. Wyjmij nadajnik z kieszeni skórzanej uprząży:



Odkręć 4 śruby, by otworzyć nadajnik. Usuń mały kawałek papieru oddzielający jedną z baterii lub włóż nowe baterie. To spowoduje włączenie nadajnika i umożliwi przekazywanie danych z nadajnika do odbiornika. Trzymaj nadajnik poza kieszenią, leżący płasko “na plecach”, z logiem skierowanym do góry.

Podczas pierwszych 4 min od włączenia nadajnika do prądu, nadajnik będzie w trybie “fast-mode”, co oznacza, że będzie wysyłał dane co 2 sekundy, aby uprościć prezentację funkcjonalności dla początkującego użytkownika. Po 4 min nadajnik przejdzie w tryb “normal-mode” i będzie wysyłał dane co 20 s, by zaoszczędzić energię i zapewnić użytkownikowi 6 miesięcy żywotności baterii.

“LINK” powinien teraz zmienić kolor z czerwonego na zielony i przestać wydawać dźwięki. To oznacza, że komunikacja pomiędzy urządzeniami działa i możesz teraz przetestować funkcje pocenia [S] i pozycji [P].



6. Upewnij się, że odbiornik jest ustawiony na alarm [S] lub [P], naciskając przycisk (B), aż w górnej części wyświetlacza ukaże się symbol [S/P]. Jeżeli wciśniesz i przytrzymasz przycisk (B) przez kilka sekund, zmienisz również tryb pozycji, na jaki ma być ustawiony odbiornik: A, B lub C. Wybierz tryb pozycji C dla “colic mode”, który jest najszybszym trybem alarmu, (najłatwiejszym do demonstracji).

Umieść nadajnik w pozycji takiej, jak na zdjęciu poniżej, by zasymulować, że koń leży:



Zauważ, że koń na wyświetlaczu leży. Wkrótce w odbiorniku zadziała alarm pozycji w formie czerwonego światła i sygnału dźwiękowego.



Aby wyłączyć alarm, obróć nadajnik w górę (z logiem na górze) i naciśnij przycisk (C). **Dla możliwie najwyższego bezpieczeństwa nadajnik wysyła sygnał alarmowy 3 razy**, (na wypadek, gdyby pierwszy sygnał alarmowy nie dotarł do odbiornika z powodu nieprzewidzianych zakłóceń przekazu). **To oznacza, że będziesz musiał(a) wyłączać alarm trzykrotnie, naciskając przycisk (C).**

7. By w łatwy sposób zaprezentować działanie alarmu pocenia, ustaw poziom pocenia na niski (taki, jak 2 lub 3), naciskając przycisk (A), aż w prawej części wyświetlacza wyświetli się w kółku numer 2 lub 3.

Po ustawieniu alarmowego poziomu pocenia na odbiorniku, chwyć jeden z czujników pocenia tak, jak na zdjęciu poniżej:



Kiedy pomierzony poziom pocenia jest tak wysoki jak twój poziom alarmowy (lub wyższy), odbiornik wysyła sygnał alarmowy w formie czerwonego światelka i sygnału dźwiękowego. Aby wyłączyć alarm, puść czujniki i naciśnij przycisk (C).


Tryb zaawansowany:

Tryb zaawansowany (Advanced Mode), (który może się również nazywać “Graph Mode” lub “History Mode”), jest włączany przez naciśnięcie przycisku (D) i informuje użytkownika o zachowaniu konia w ciągu ostatnich 6 godzin.

Aby zademonstrować jego funkcjonalność, zaleca się, by zresetować nadajnik poprzez wyjęcie jednej z baterii z nadajnika i włożenie jej z powrotem. Należy również zresetować wzmacniacz, poprzez wyjęcie i ponowne włożenie przewodu zasilającego. Dzięki temu nadajnik będzie wysyłał dane szybciej, co uprości demonstrację.

W trybie demonstracyjnym cały wyświetlacz jest wypełniony danymi 10-minutowymi przedstawionymi na wykresach. Podczas normalnego użytkowania (4 min po zresetowaniu) całkowite wypełnienie wyświetlacza wykresami przedstawiającymi zachowanie konia trwa 6 godzin.

Układaj nadajnik w różnych pozycjach oraz chwytaj czujniki pocenia, by stworzyć wykresy podobne do poniższych:

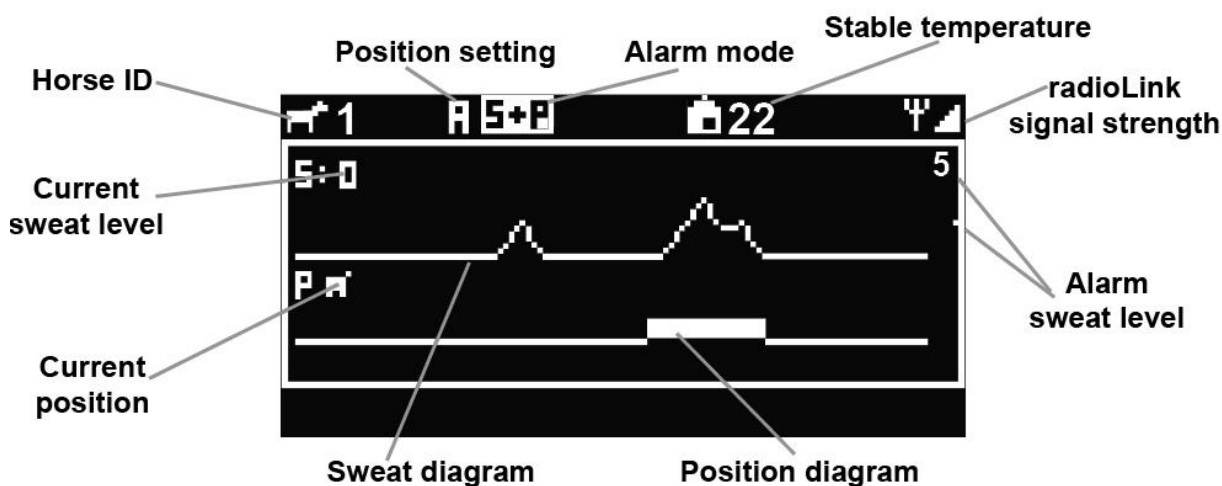

Alarmy działają tak samo, jak w trybie “Simple Mode”.

INFORMACJE DODATKOWE:

Aby zmienić głośność lub podświetlenie wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj przycisk (D) przez 2 sekundy, by wejść w tryb “Settings Mode”. Naciskając przyciski (A), (B) lub (C), (A) zmieniasz ustawienia wyświetlacza pomiędzy ON, OFF or AUT = 1 min. (B) kalibrujesz termometr wzmacniacza w stajni (patrz podręcznik) i (C) zmieniasz głośność alarmu.

Powrót do “Simple Mode” lub “Advanced Mode” poprzez naciśnięcie przycisku (D).

Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z najnowszym podręcznikiem, dostępnym pod adresem:

www.horsealarm-europe.com, wysłać e-mail na adres: service@horsealarm-europe.com

/ lub zadzwonić do LUDA Elektronik Customer Support pod nr tel.: +46 (31) 31 30 290.

Dziękujemy za zakup produktu LUDA Elektronik!